

Guía de tallas Neo Flex Active

Neo-Flex Active es una funda de suspensión protésica duradera y rentable. Está fabricado con un neopreno resistente sin látex con rodillera incorporada para mayor amortiguación y desgaste. Su forma flexionada y su centro de rodilla de nailon añaden suavidad y flexibilidad para mejorar la comodidad y la movilidad. El Neo-Flex Active se puede recortar en los extremos proximal y distal para personalizar la longitud si es necesario.

Instrucciones de recorte:

Si desea ajustar la longitud del extremo proximal y/o distal de la manga, elija cualquier punto ENTRE las tachuelas de refuerzo ubicadas a lo largo de la costura posterior de la manga y marque la línea de corte con tiza o marcador. Coloque la manga de lado y corte de posterior a anterior a lo largo de la línea de corte con unas tijeras afiladas.



Indicaciones:

Para uso como ayuda de suspensión protésica.

Advertencia:

No lo use sobre piel rota o irritada. Suspenda el uso de la funda si se desarrolla irritación de la piel, ampollas o sarpullido con el uso. No lo use mientras duerme ni lo use si tiene problemas circulatorios.

Instrucciones de cuidado:

Lave la funda con un detergente suave y agua fría y déjela secar en posición horizontal. No utilice calor excesivo, blanqueador con cloro ni disolventes.

Garantía:

Los defectos de fabricación o materiales utilizados estarán cubiertos durante 90 días a partir de la fecha de compra.

El artículo defectuoso debe devolverse limpio y seco y será reemplazado o reparado.

Para obtener el tamaño adecuado, mida la circunferencia del muslo 5" proximal al borde superior de la rótula y consulte la tabla de tallas.

Neo-Flex Active está disponible en dos tonos gris/negro.

Circunferencia (cm)	Con Pin 3.00 mm, 6mm, 6/3mm o 9 mm	Sin Pin 3.00 mm, 6mm, 6/3mm o 9 mm
10.5" - 12,5"	0	CA700 - FPA - 0
11.5" - 13"	1	CA700 - FPA - 1
12,5" - 14	1.5	CA700 - FPA - 15
14" - 16"	2	CA700 - FPA - 2
15" - 17"	2.5	CA700 - FPA - 25
16" - 18"	3	CA700 - FPA - 3
18,5" - 20"	4	CA700 - FPA - 4
21" - 23"	5	CA700 - FPA - 5