

Anterior Posterior Tapered Liner

N.º de patente 6,454,812* | 8,226,732 | 8,246,694 | 8,349,021 | 8,226,732

El liner ALPS® AP Tapered tiene una forma cónica progresiva desde la parte anterior más gruesa hasta la posterior más delgada para ofrecer libertad de movimientos a los usuarios transtibiales.

La pared delantera de 6 mm garantiza una elevada protección a las zonas óseas. Combinando un gel de alta densidad con un tejido de elasticidad vertical reducida, este liner minimiza el movimiento de los tejidos blandos y reduce el pistoneo vertical, ofreciendo un alto nivel de control de la pierna protésica.



Material



High Density Gel

Tejido



Tejido negro

Nivel de actividad



K1



K2 ✓



K3 ✓



K4 ✓

Espesor



Cónico 6/3mm

Beneficios clave



Reduce el pistoneo gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido y la matriz distal (versión con pin)



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad del Gel HD de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Su pared anterior de 6 mm de espesor protege las zonas óseas



Gran libertad de movimiento gracias al espesor posterior de 3 mm



Minimiza el movimiento de los tejidos blandos y proporciona un control excelente de la pierna protésica combinando el gel de alta densidad con un tejido con limitada elasticidad vertical

Liner Anterior Posterior Tapered APDT/APFR. Tabla de medidas.


Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.

Tamaño medido (cm)	Con pin 6/3 mm cónico	Sin pin 6/3 mm cónico
20-23 cm	APDT20-TP	APFR20-TP
24-25 cm	APDT24-TP	APFR24-TP
26-27 cm	APDT26-TP	APFR26-TP
28-31 cm	APDT28-TP	APFR28-TP
32-37 cm	APDT32-TP	APFR32-TP

Sección transversal



APFR
Sin pin

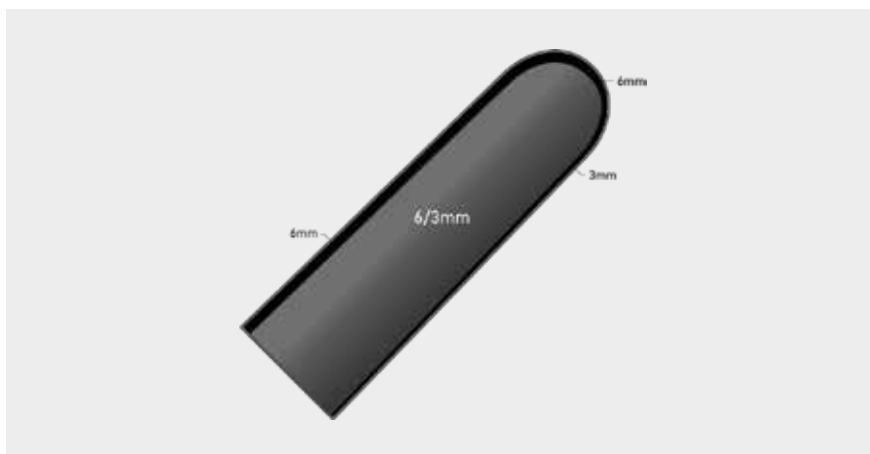

APDT
Con pin

MATRIZ REFORZADA
Extremos distales más anchos que son proporcionales al tamaño del liner



Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en 5 sencillos pasos

